

# NÁVOD K POUŽITÍ

# DURALOVÁ SKLÁDACÍ HŮL

ANATOMICKÁ

ergonomická rukojeť

---

lze složit na čtyři díly

---


upravitelná výška  
v rozmezí 82,5 - 92,5 cm

---

vyměnitelný protiskuzový  
nástavec

---

nosnost 100 kg

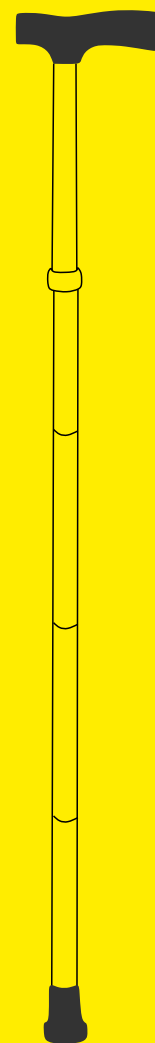

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí. Vhodnost a nastavení výšky konzultujte s ošetřujícím lékařem. Nepřekračujte maximální nosnost 100 kg. Při upravování výšky postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu. Při pohybu na vlhkém nebo kluzkém povrchu dbejte zvýšené opatrnosti. Doporučujeme používat pouze s vhodnou obuví s pevnou patou. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

## POUŽITÍ

Hůl je kompenzační pomůcka, která je určena pro osoby se sníženou mobilitou. Hůl poskytuje uživateli odlehčení dolních končetin, oporu a stabilitu při chůzi. Používá se i pro pacienty při poúrazových či pooperačních stavech nebo při rehabilitaci.

## NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Stiskněte bezpečnostní pojistku (1) a tahem nebo tlakem posuňte do požadované polohy (2). Pojistku nechte volně zapadnout do nejbližšího otvoru (3). Optimální výšku konzultujte s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

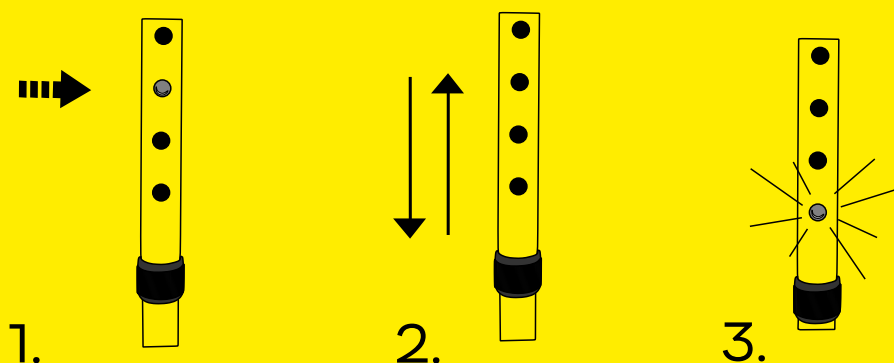

## ÚDRŽBA

Pro zachování maximální stability a správné funkce se doporučuje pravidelná kontrola a stav výškové pojistky a protiskluzového nástavce. Pro zachování bezpečnosti použití doporučujeme opotřebovaný protiskluzový nástavec neprodleně vyměnit. V případě znečištění můžete omýt běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky bez obsahu rozpouštědel.

## SERVIS A OPRAVY

V případě potřeby odstranění závady, provedení servisu nebo pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce.

## PARAMETRY

Délka hole: 82,5 – 92,5 cm  
 Hmotnost hole: 0,3 kg  
 Počet výškových poloh: 5  
 Nástavec: 100 CTC (průměr trubky 18 mm)  
 Nosnost hole: 100 kg