

**ÚDRŽBA**

Pro zachování maximální stability a správné funkce se doporučuje pravidelná kontrola stavu sedačky. V případě znečištění můžete omýt běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky bez obsahu rozpouštědel.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě potřeby odstranění závady, provedení servisu nebo pro více informací kontaktujte autorizovaného prodejce.

**PARAMETRY**

Výška: 10 cm

Rozměr prkénka: 35 x 39 cm

Hmotnost: 1,2 kg

Nosnost: 190 kg

**NÁVOD K POUŽITÍ****ZVYŠOVACÍ  
NÁSTAVEC NA WC****S POKLOPEM**


odolný, omyvatelný plast

pojistka k zajištění  
nástavce na toaletu

zvýšení toalety o 10 cm

univerzální tvar

nosnost 190 kg

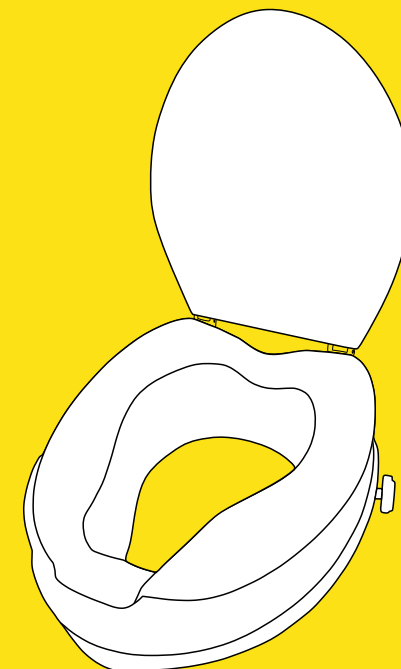


**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí. Vhodnost výšky nástavce konzultujte s ošetřujícím lékařem. Nepřekračujte maximální nosnost 190 kg. Neumísťujte nástavec na běžné záchodové prkénko. Nástavec by měl pohodlně a pevně nasedat na toaletní mísu, neměl by se pohybovat do stran. Při zavírání poklopu postupujte opatrně, abyste se vyvarovali zachycení nebo úrazu ruky či prstů. Pro zajištění větší bezpečnosti při vstávání a usazování doporučujeme kombinovat nástavec s madlem. Před použitím se ujistěte, že nástavec je pevně umístěn na toaletě a že je suchý. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

**POUŽITÍ**

Zvyšovací nástavec je kompenzační pomůcky, která je určena pro osoby se sníženou mobilitou. Nástavec usnadňuje uživateli proces osobní hygieny, snižuje riziko pádu či úrazu, usnadňuje manipulaci s pacientem s omezenou schopností pohybu.

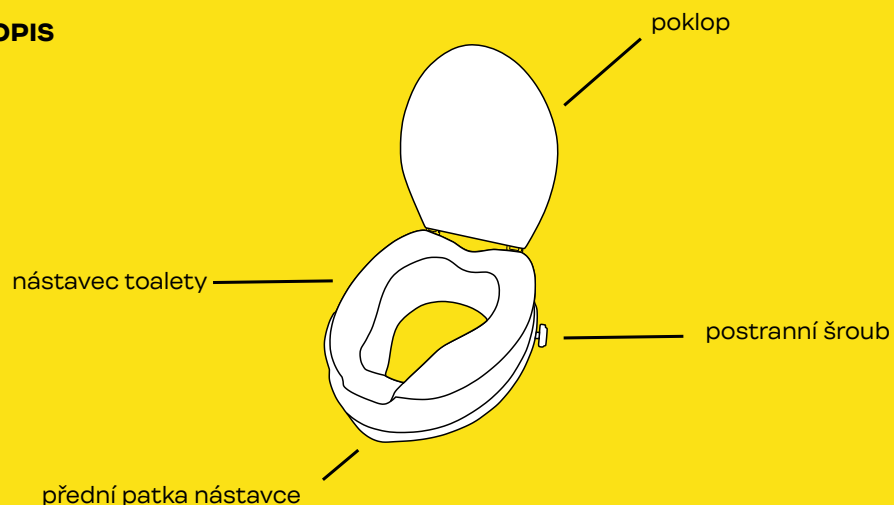**POPIS****PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE NA TOALETU**

Zvedněte nebo sundejte záchodové prkénko. Umístěte nástavec na záchodovou mísu (1). Zajistěte přední patku nástavce (2), ujistěte se, že nástavec správně nasedá na záchodovou mísu a utáhněte pevně postranní šroub.

